



MAD Nasal

Dispositif d'atomisation pour muqueuses intranasales

Le moyen indolore et sécurisé d'administrer des médicaments sans ligne intraveineuse.

Administration de médicaments

Le dispositif MAD Nasal de Teleflex a été inventé par un médecin urgentiste et offre une option utile afin de choisir un accès alternatif pour administrer des médicaments.*

Efficace rapidement

L'administration des médicaments par voie nasale à l'aide du dispositif MAD Nasal est rapide, simple et élimine le temps de préparation de l'intraveineuse, préservant ainsi les ressources liées à l'abord veineux. De plus, aucune technique stérile n'est requise. Ainsi, davantage de temps est consacré aux soins du patient et le temps de pose d'une intraveineuse douloureuse est oublié.

Aucune aiguille

Le dispositif MAD Nasal permet une administration intranasale de médicaments de manière indolore, efficace, rapide et non invasive. Ce procédé augmente la sécurité pour le personnel soignant et pour le patient, en évitant le risque de blessure par piqûre d'aiguille¹.

Administration contrôlée

L'extrémité malléable permet d'atomiser quelle que soit la position, ce qui facilite la bonne administration de médicaments en cas de mauvaise observance par les patients. Les particules atomisées présentent la taille idéale pour une absorption rapide à travers les muqueuses* jusque dans le sang, évitant ainsi le métabolisme de premier passage intestinal et hépatique.

Avantages



Le clinicien

Aucune préparation d'intraveineuse fastidieuse



Votre établissement


Aucune préparation d'intraveineuse, aucun danger de piqûre et nul besoin de désinfecter/préparer le site d'administration



Le patient

Administration du traitement sûre, indolore et efficace rapidement pour les patients pédiatriques et les adultes

*Pour une utilisation avec des médicaments autorisés pour une administration intranasale.

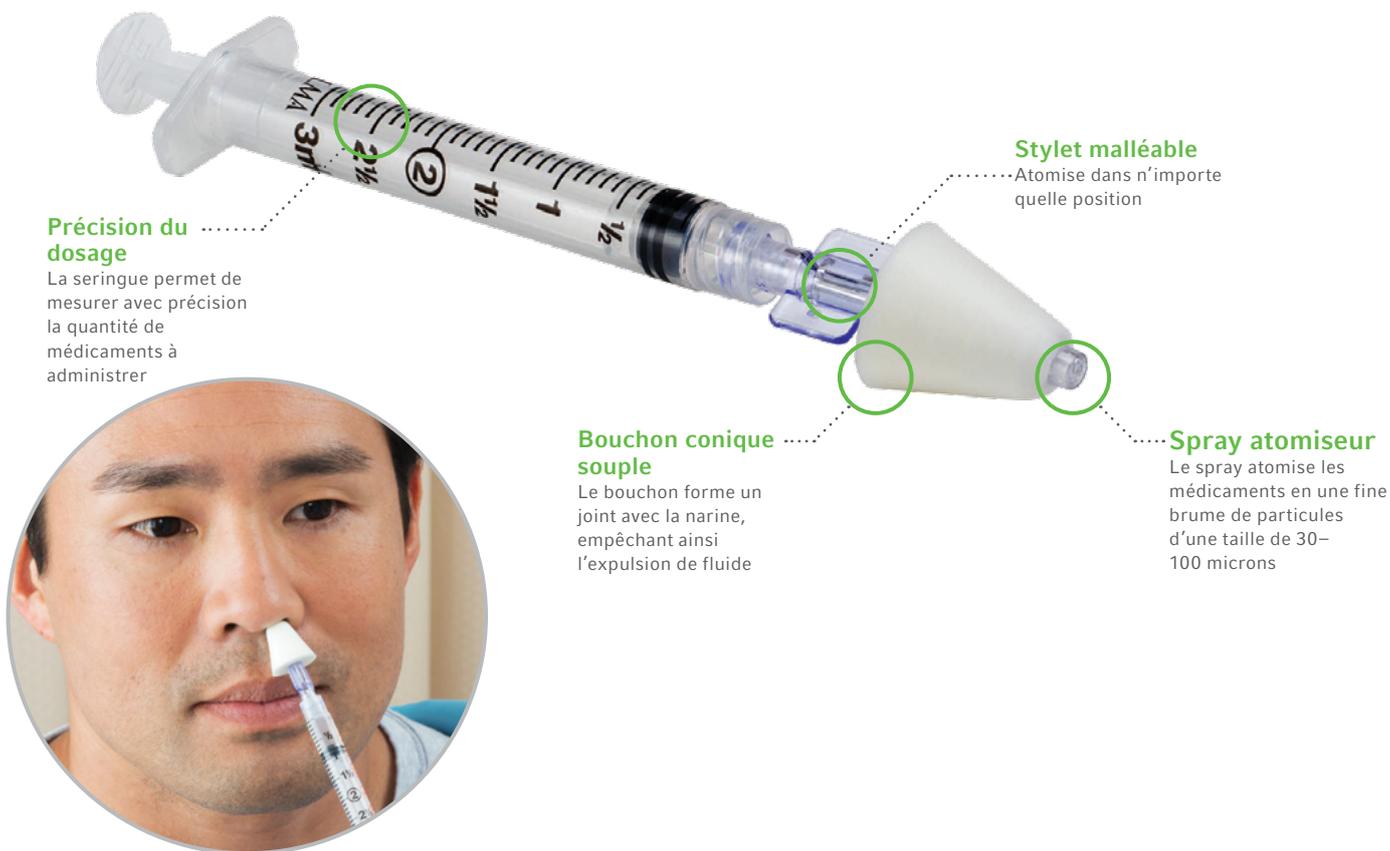

Précision du dosage

La seringue permet de mesurer avec précision la quantité de médicaments à administrer

Stylet malléable

Atomise dans n'importe quelle position

Bouchon conique souple

Le bouchon forme un joint avec la narine, empêchant ainsi l'expulsion de fluide

Spray atomiseur

Le spray atomise les médicaments en une fine brume de particules d'une taille de 30-100 microns

Spécifications relatives au dispositif d'atomisation sur les muqueuses intranasales MAD Nasal

Dimension type de particule	30-100 microns
Espace mort du dispositif	MAD100/MAD110/MAD130/ MAD140 = 0.15 ml MAD300 = 0.06 ml
Diamètre de l'extrémité	0,17" (4,3 mm)

Dispositif d'atomisation sur les muqueuses intranasales MAD Nasal

RÉF.	DESCRIPTION DU PRODUIT	QTÉ/ BOÎTE
MAD100	MAD Dispositif nasal avec seringue de 3 ml	25
MAD110	MAD Dispositif nasal avec seringue de 1 ml	25
MAD130	MAD Dispositif nasal avec seringue de 1 ml et adaptateur pour flacon	25
MAD140	MAD Dispositif nasal avec seringue de 3 ml et adaptateur pour flacon	25
MAD300	MAD Dispositif nasal sans seringue	25

Pour en savoir plus, consultez le site : teleflex.com

References:

1. Suresh M. Management of Predicted Difficult Airway in A Parturient Undergoing Cesarean Delivery, where Airway Management is Necessary. *Shnider and Levinson's Anesthesia for Obstetrics*. 2013;(24):381-382

Teleflex, le logo Teleflex, MAD et MAD Nasal sont des marques commerciales ou des marques déposées de la société Teleflex Incorporated ou de ses filiales aux États-Unis et /ou dans d'autres pays. Les informations incluses dans le présent document ne sauraient se substituer au mode d'emploi du produit. Tous les produits ne sont pas disponibles dans tous les pays. Veuillez contacter le représentant de votre pays. Révision : 03/2022

Le document est à destination des professionnels de santé. Veuillez vous référer très attentivement à la notice d'utilisation pour les recommandations. Vérifier l'intégrité de l'emballage du dispositif médical avant usage. Dispositif médical de classe I. Organisme notifié : SGS-CE1639. Fabricant: Teleflex Medical USA

© 2023 Teleflex Incorporated. Tous droits réservés.
MCI-2019-0282-FR- RÉV. 1 · 01 23 PDF



Distribué par :
Siège social de Teleflex International, Irlande Teleflex Medical Europe Ltd. IDA Business & Technology Park
Dublin Road Athlone Co Westmeath Tél. +353 (0)9 06 46 08 00 Fax +353 (0)14 37 07 73 orders.intl@teleflex.com
Royaume-Uni Tél. +44 (0)14 94 53 27 61 info.uk@teleflex.com
Afrique du Sud Tél. +27 (0)11 807 4887 assist.africa@teleflex.com